

# 骨伝導ハンドセットS

## 取扱説明書

このたびは、骨伝導ハンドセットSをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をよく理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなど、いつも手もとに置いてお使いください。

### セットをご確認ください

- 骨伝導ハンドセットS…1個
- 取扱説明書(本書)…1部
- ハンドセットコード…1本
- 保証書…1部

### 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### ■本書中のマーク説明

<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
<b>お願い</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなったり、機能停止を招く内容を示しています。



- 本商品は、シルバーホン・ふれあいS IIやハウディ 優V、シルバーホン・ひびきS III専用です。それ以外には使用しないでください。
- 本商品を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となることがあります。



- シルバーホン・ふれあいS IIやハウディ 優V、シルバーホン・ひびきS IIIで設定した受話音量によっては、本商品の振動部を耳にあてて使用したときに音量が大きくなり、聴力障害の原因となることがあります。




#### お願い

- 補聴器などをお使いのかたは、補聴器などに本商品を直接あてないでください。「ピー」と鳴ることがあります。
- 本商品をベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の变色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。
- 本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- 骨伝導ハンドセットSの振動部に強い力を加えないでください。故障の原因となることがあります。

### 骨伝導のしくみ


通常、音声は鼓膜を通して受け取ります。骨伝導は音声を振動に変えて直接頭蓋骨に伝えます。これが内耳に達し、聴覚神経を通して脳に届き、音として感じます。

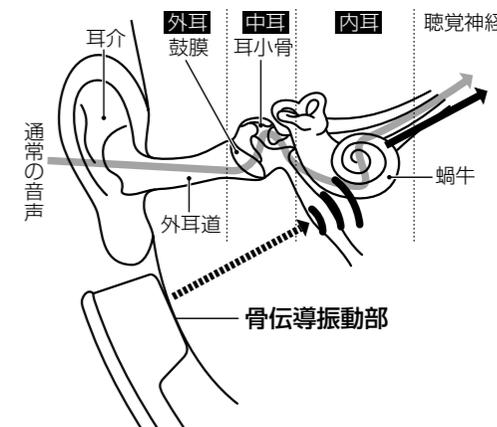

骨伝導ハンドセットSは、騒音の大きい場所での通話や、高齢者のかたや難聴のかたの利用など、普通の電話機では聞こえにくい場所や状況での使用に適しています。

## 骨伝導ハンドセットSの使いかた

骨伝導振動部を耳の周辺にあてて聞きます。聞き取りやすい位置でお使いください。

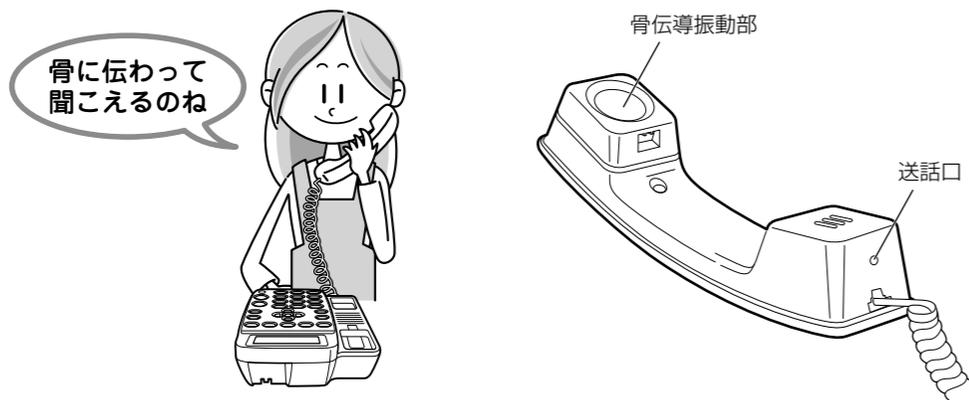

### 📎 お知らせ

- 聞こえかたには個人差がありますので、よく聞こえる場所にあてて、ご使用ください。
- ご使用になる環境により、聞こえかたには個人差があります。
- 設定した受話音量によっては、相手の声が周囲に聞こえる場合があります。
- 騒音の大きい場所でお使いの場合は、耳栓を使用し、骨伝導ハンドセットSの振動部を耳の周辺にあてると聞き取りやすくなる場合があります。



### 注意


- 本体で設定した受話音量によっては、骨伝導ハンドセットSの振動部を耳にあてて使用したときに音量が大きくなり、聴力障害の原因となることがあります。

### 🛑 STOP お願い


- 補聴器などをお使いのかたは、補聴器などに骨伝導ハンドセットSを直接あてないでください。「ピー」と鳴ることがあります。
- 骨伝導ハンドセットSの振動部に強い力を加えないでください。故障の原因となることがあります。

## 骨伝導ハンドセットSを接続する


- 1 ハンドセットコードをハンドセットコード差入口(標準受話器)から抜く。

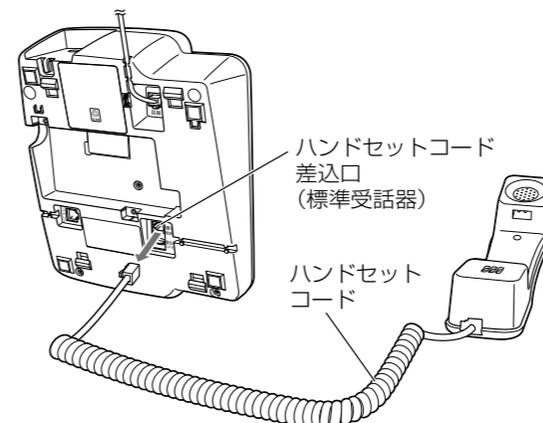

### ●ハンドセットコードを引き抜くとき

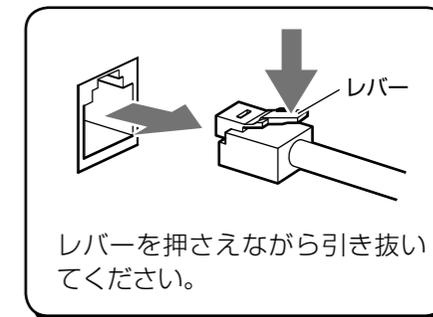


- 2 シャッターを動かし、骨伝導ハンドセット用の差入口(骨伝導ハンドセット)を開く。

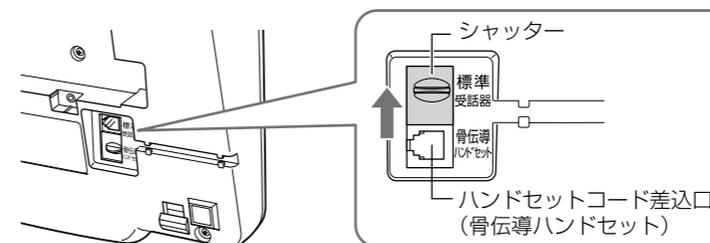

- 3 骨伝導ハンドセットSに付属のハンドセットコードを、骨伝導ハンドセット用の差入口(骨伝導ハンドセット)と骨伝導ハンドセットSに差し込む。

ハンドセットコードはハンドセットコード固定用溝に引っかけて固定します。

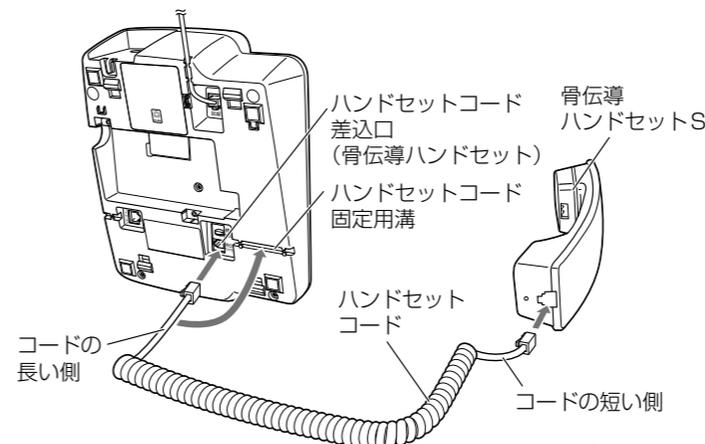

### ●ハンドセットコードを差し込むとき

